

DxChamber^{TM/MC}

Disposable Valved Holding Chamber
Chambre de retenue valvée jetable

**FOR HOSPITAL USE AND PULMONARY FUNCTION TESTING
CONÇU À DES FINS D'USAGE EN MILIEU HOSPITALIER ET
D'EXAMEN FONCTIONNEL DES POUMONS**

Single Patient Use / Utilisation Individuelle

This chamber is intended to be used by a healthcare provider to deliver metered dose inhaler aerosol medication to the patient's lungs / Cette chambre est conçue à l'usage des fournisseurs de soins de santé afin de fournir une dose précise de médicament à administrer par aérosol-doseur dans les poumons du patient

Speak to your healthcare provider to use the **AeroChamber Plus[®] Flow-Vu[®]** Chamber for at-home use / Consultez avec votre spécialiste de soins de santé pour utiliser la chambre **AeroChamber Plus[®] Flow-Vu[®]** à la maison.

REF 101557

© TMI 2016, 2018, 2020. All rights reserved / Tous droits réservés.
M.C./marques de commerce de Trudell Medical International.

101992-001 Rev D. TM/® trade-marks of Trudell Medical International (TMI).
London, Ontario, Canada N5V 5G4 +519-455-7060 www.trudellmed.com
Manufactured by / Fabriqué par : Trudell Medical International, 725 Baransway Dr.

- 1 Shake inhaler and remove cap.
Agitez l'aérosol-doseur et retirez le capuchon.
- 2 Insert inhaler into chamber.
Insérez l'aérosol-doseur dans la chambre.
- 3 Press inhaler and inhale slowly and deeply, holding your breath for 5-10 seconds. / Appuyez sur l'aérosol-doseur et inhalez lentement et profondément, retenez votre respiration pendant 5 à 10 secondes.
- Do not leave the chamber unattended with children. / Ne laissez pas la chambre à la portée des enfants
- Ensure directions for use have been read prior to use. / Assurez-vous de bien lire les directives avant d'utiliser le dispositif.
- Discard after one day of use. / Jetez après une journée d'utilisation.

ou si des pièces sont manquantes.
Examine chamber and replace immediately if damaged or missing parts. /

DIRECTIONS FOR USE / MODE D'EMPLOI